

Drugcheck frasco es una prueba rápida para detectar el consumo reciente de drogas ilícitas.

La detección de drogas en los trabajadores nos ayuda a prevenir accidentes en las aéreas de trabajo, ausentismo laboral, así como la variación de estados de ánimo las cuales se pueden reflejar en bajo rendimiento, discusiones entre compañeros, síndrome de abstinencia, ansiedad, etc.



Modo de Empleo



1. Recoja la orina directamente en el frasco



2. Retire la Etiqueta despues de 5 minutos

3. Interprete resultados

Una línea indica un resultado positivo (+)
Dos líneas indican un resultado negativo (-)



Nota: No interprete los resultados después de 10 minutos.

VENTAJAS

PRECISIÓN: Cumple con los niveles de corte recomendados por SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration).

AUTÓNOMO: Una muestra positiva puede enviarse en el mismo frasco a un laboratorio de confirmación para análisis de cromatografía de gases / espectrometría de masas (CG/EM). Cada frasco tiene un tiempo de caducidad de 18 meses hasta antes de Utilizarse e incluye una tira de temperatura para verificar la muestra y etiqueta de identificación.

ETIQUETA DE PRIVACIDAD: Una etiqueta de lengüeta oculta los resultados de la prueba, para que únicamente personal autorizado pueda leerlos de forma confidencial.

DrugCheck® puede adquirirse en diferentes presentaciones y/o combinaciones para detectar desde 4 hasta 12 drogas simultáneamente.