


DrugCheck® DIP Tarjeta es la prueba antidrogas más novedosa, tecnológicamente avanzada y de mayor venta en el mercado en EE.UU., Europa, México y Latinoamérica. Sencillo y fácil de utilizar, siendo la única prueba que no requiere pasos para efectuarse.


DrugCheck® está aprobado por la Food and Drug Administration de Estados Unidos (FDA) y la Secretaría de Salud de México (SSA).



Modo de Empleo

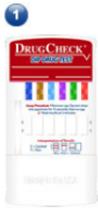


1 Saque la Tarjeta del empaque metalizado.

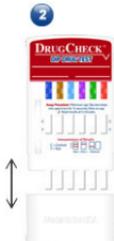


2 Retire la cubierta que protege a las tiras.



3 Sumerja la Tarjeta en la muestra de orina.

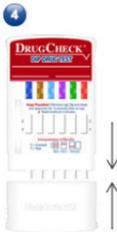

4 Retire la Tarjeta de la orina cuando comience a subir la muestra por las trillas. Coloque la cubierta protectora en la Tarjeta y déjela en una superficie plana para que termine el proceso.

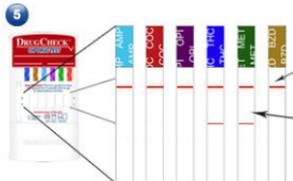

Una línea indica un resultado positivo (+)

Dos líneas indican un resultado negativo (-)

- Los resultados positivos aparecen entre 5 y 10 minutos después de la recolección de la muestra.

- Los resultados negativos se pueden leer a partir de 1 minuto que empiece a correr la muestra.