


# TARJETA INSTANT-VIEW

El Panel de Drogas en Orina Instant-View es un inmunoensayo cualitativo para detectar la presencia desde 2 y hasta 12 diferentes drogas y/o sus metabolitos en orina humana de acuerdo a puntos de corte específicos, en un solo ensayo.

Existen diferentes presentaciones que varían de acuerdo a la cantidad y tipos de parámetros (drogas) capaces de detectar. Para cada tipo de droga le corresponde un resultado independiente, el cual puede ser positivo o negativo, dependiendo si se rebasan los puntos de corte. Adicionalmente, cada tira incluye un control que permite verificar si el procedimiento de la prueba se desempeña correctamente.

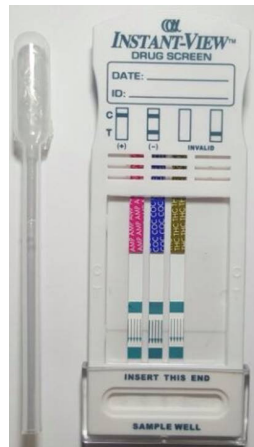

## Características



método fácil  
y practico



Resultados en  
5 Minutos



No requiere  
Refrigeración




Confiable  
(99.7% de  
precisión)

## 2 Opciones de Modo de Empleo


### Método de Inmersión

1

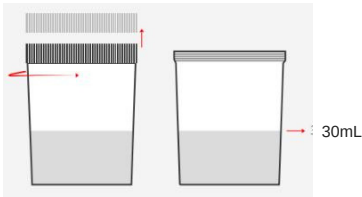

Recolecte al menos 30mL de muestra  
de orina en un frasco.


2

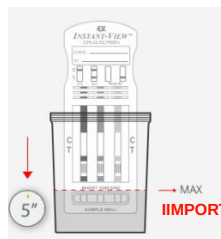

**IMPORTANTE: NO SOBREPASAR  
EL LIMITE.**

Inserte la prueba en el frasco hasta que  
la orina llegue al límite indicado. durante  
10 a 15 segundos

3

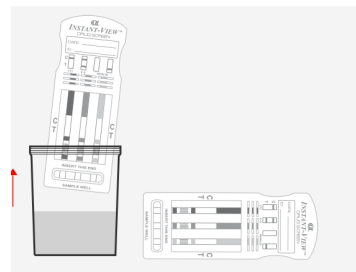


Retire y coloque en una superficie  
plana.


4

### Interpretación de resultados

Lea los resultados a los 5 minutos.  
NO ESPERE MÁS DE 10 MINUTOS.

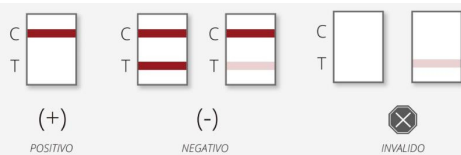


1

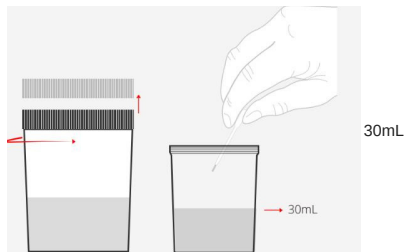

Recolecte al menos 30mL de muestra de orina en un frasco.

2

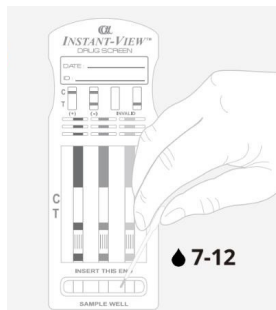

Agregue de 7 a 12 gotas de orina en la ranura de la prueba.

### 3 Interpretación de resultados

Lea los resultados a los 5 minutos.  
NO ESPERE MÁS DE 10 MINUTOS.

