

PRUEBA DE INFLUENZA

Quidel QuickVue™ Influenza

A+B Test

La prueba de Influenza A+B QuickVue® permite la detección cualitativa rápida de los antígenos de la gripe tipos A y B directamente de una torunda nasal, una torunda nasofaríngea, muestras de aspiración o lavado nasal. Esta prueba rápida de influenza está diseñada para utilizarse como ayuda en el diagnóstico diferencial rápido de una infección aguda con el virus de la gripe tipo A o B. Registro sanitario: 0877R2017 SSA


QuickVue Influenza A+B fue la primera prueba rápida de Influenza aprobada por FDA y desde entonces Quidel® ha continuado innovando al desarrollar con altos estándares de calidad un amplio catálogo de pruebas rápidas.



BENEFICIOS

- Diagnóstico Rápido**
Identifica Influenza tipo A o B en muestras positivas, en sólo 10 minutos para una mejor y más rápida determinación de resultados ante el paciente.
- Detección Precisa**
La prueba de Influenza QuickVue A+B detecta ambos tipos de antígenos virales A y B. Sensibilidad de 94% y Especificidad del 90% para el tipo A. Sensibilidad de 70% y Especificidad del 97% en tipo B.
- Fácil de Usar**
Brinda resultados para ambos tipos de Influenza (A y B) mediante un solo procedimiento.

Modo de Empleo

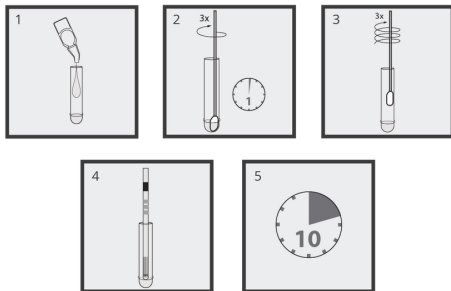

- 1.-Agregue solución salina (incluido) al vial de prueba (incluido).
- 2.-Inserte la torunda con la muestra al vial y revuélvala 3 veces.
- 3.-Espere un minuto, retire la torunda del vial girándolo 3 veces.
- 4.-Inserte la tira reactiva en el vial.
- 5.-Interprete los resultados después de 10 minutos


Procedimiento




QuickVue
Influenza A+B TEST

Tarjeta de Procedimientos


Procedimiento con torunda nasal o nasofaríngea

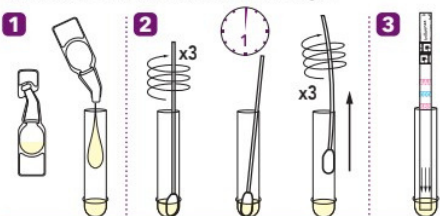

Procedimiento de lavado/aspiración nasal

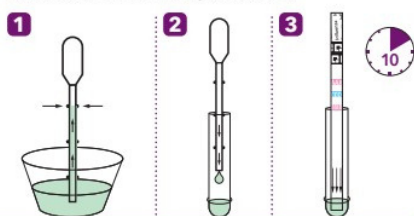

*** Mire con atención. Esto es un resultado positivo.**
Incluso si observa una línea de prueba rosa apenas visible y una línea de control azul, el resultado se considerará como **POSITIVO**. La línea de prueba positiva suele destacar, pero la intensidad de la línea de prueba puede cambiar.

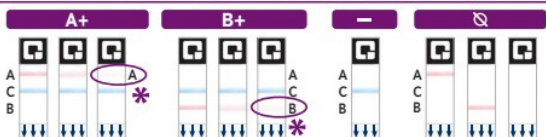

A = Línea de prueba de la gripe A C = Línea de control

B = Línea de prueba de la gripe B

 Consult Instructions for Use
Consulta las instrucciones de uso

 Quidel Corporation
San Diego, CA 92121 USA
quidel.com

1072004 (12/14)