

Prueba Rápida COVID-19 +INFLUENZA A/B

Duo Test

Pruebas rápidas para la detección de Antígenos para COVID-19, así como de Influenza A / B. Este tipo de pruebas son seguras y fáciles de usar, en poco tiempo proporcionan resultados precisos e información importante, además aumentan la cantidad de pruebas a realizar debido a que no es necesario el uso de equipo adicional.

Es un inmunoensayo para la detección cualitativa simultánea de antígenos del SARS-CoV-2, antígenos del virus de la influenza tipo A / tipo B directamente de muestras de hisopados nasofaríngeos

Algunos síntomas del COVID-19 e Influenza son similares, puede ser difícil de diferenciarlos basándose únicamente en los síntomas.


Por lo tanto, el diagnóstico rápido y preciso es esencial para asegurar la efectividad de los tratamientos para el paciente infectado.

Muestra : Hisopado nasofaríngeo


COFEPRIS: CAS/SESSDM/623/2022



**Resultado
en 15 minutos**

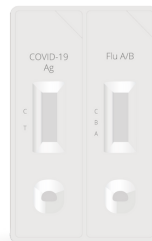


Modo de Empleo

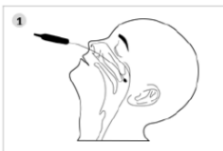


1 – Utilice un hisopo de recogida de muestras de un solo uso. Inserte un hisopo nasofaríngeo en la fosa nasal del paciente, frote sobre la superficie de la parte posterior nasofaríngeo. El hisopo debe alcanzar una profundidad igual a la distancia desde fosas nasales a la abertura exterior de la oreja.

2 – Retire lentamente el hisopo mientras lo gira. Coloque el hisopo de toma de muestra en el Tubo de tampón de extracción que contiene 300 µL de extracción del búfer y gírelo más de 5 veces para permitir la extracción.

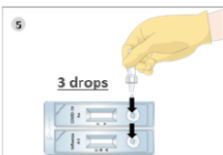

3 – Saque el hisopo de recolección de muestras presionando y apretando los lados del tubo para extraer el líquido restante del hisopo.

4 – Presione la tapa de goteo en el tampón de extracción tubo que contiene la muestra procesada.

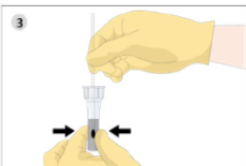

5 – Invierta el tubo de tampón de extracción y agregue 3 gotas de muestra procesada en el pocillo de muestra de cada Cassette de prueba.

6 – Lea los resultados en 15 minutos después de colocar la muestra

La lectura del resultado después de 30 minutos es inválido.

• Influenza

Influenza A/B

Resultado **Positivo**

· La línea de control (C) y la línea de prueba (A) aparecen en la ventana de resultado: Positivo para el virus de la influenza A. La línea de control (C) y la línea de prueba (B) aparecen en la ventana de resultado: Positivo para el virus de la Influenza B.

Positivo



Influenza A/B

Resultado **Negativo**

Si solo aparece la línea de control (C) en la ventana de resultados: significa resultado negativo para los virus de influenza A y B.

Negativo



Influenza A/B

Resultado **Inválido**

Si la línea de control (C) no aparece en la ventana de resultados, se determina que es una prueba inválida.

· Vuelva a realizar la prueba utilizando un Cassette de prueba nuevo.

Inválido



• COVID-19

COVID-19

Resultado **Positivo**

Positivo: la línea de prueba (T) y la línea de control (C) son apareció en la ventana de resultados: **Positivo para antígeno SARSCoV-2.**

Positivo



COVID-19

Resultado **Negativo**

Negativo: si solo aparece la línea de control (C) en el resultado:

Negativo para antígeno SARS-CoV-2

Negativo



COVID-19

Resultado **Invalido**

Inválido: si la línea de control no aparece, el resultado es no válido y vuelva a realizar la prueba con un nuevo cassette de prueba.

Inválido

