

Prueba rápida para la detección de alcohol en saliva  
CERTUM Alcohol Rapid Test Dipstick ( saliva)

El test de alcohol en saliva CERTUM es una prueba rápida con un método altamente selectivo para detectar la presencia de alcohol en saliva y proporciona una aproximación a la concentración de alcohol en sangre, se interpreta visualmente comprobando el color con otros proporcionados para concentraciones relativas de alcohol en sangre.

Registro sanitario: **1018R2022 SSA**


### Características

Características principales de las tiras reactivas de alcohol en saliva

- Tira reactiva **rápida y fácil** de usar para comprobar el nivel de alcohol en la saliva
- Resultados en solo **2 minutos**
- La tabla de colores proporciona concentraciones relativas aproximadas de alcohol en sangre (**BAC**) de **0,02 % a 0,30 %**
- **No requiere instrumentación**
- La prueba de alcohol en saliva evita la recolección de orina
- Permite pruebas rápidas de alcohol in situ
- Cada tira de prueba está envuelta individualmente en papel de aluminio.
- La tira de prueba de alcohol en saliva **CERTUM tiene la marca CE para la venta en la Unión Europea**
- Económica – Con una única tira tiene una excelente relación costo/beneficio y efectividad con una pequeña muestra.
- No requiere equipo Adicional



### Modo de Empleo

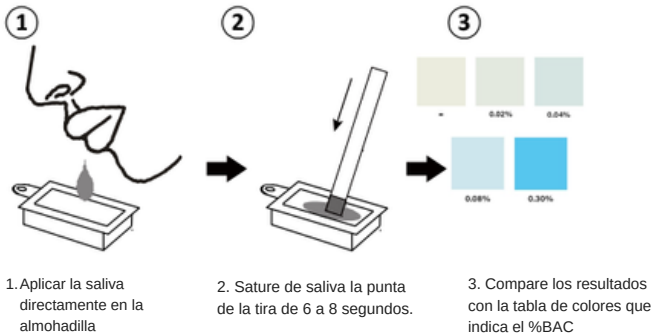

#### Como leer los resultados de la tira de prueba de alcohol en saliva

- Cada lámina de tira de prueba de alcohol tiene una guía de comparación de resultados de color que permite obtener resultados de prueba rápidos.
- Simplemente haga coincidir el color de la almohadilla con la guía de comparación en la lámina.

- 0.0 si no se detecta alcohol
- 20 mg/100ml
- 80 mg/100ml
- 300 mg/100 ml

#### Interpretación de resultados

